

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Guía de referencia rápida para el sistema de blanqueamiento de dientes Niveous.

1. Retire las ampollas y los Pinceles del refrigerador 15 minutos antes de utilizarlos.
 2. Espere que estén a temperatura ambiente.
 3. Mantenga la resina dique refrigerada y utilícela inmediatamente después de retirarla del refrigerador.
 4. Haga profilaxis con una pasta profiláctica que no contenga flúor.
 5. Aísle los dientes con resina dique Niveous, ó utilice goma dique convencional.
 6. Corte la punta de plástico de la ampolla que contiene el blanqueador.
 7. Dispense el gel en un vaso dappen ó directamente sobre los dientes.
 8. Agite el gel utilizando un Pincel Acelerador por 15 segundos sobre el diente. Aparecerán pequeñas burbujas indicando que el proceso de oxidación del blanqueamiento ha empezado
 9. Se recomiendan dos aplicaciones con períodos de 15 minutos cuando se utiliza una lámpara que proporciona calor.
 10. Cuando utilice una luz Halógena aplíquela en cada diente por un mínimo de dos minutos por diente (haciendo dos pasadas de un minuto cada una con la luz). Mantenga la luz a un cuarto de pulgada aproximadamente de la superficie del diente.
 11. Si utiliza un láser de alta intensidad ó una luz de arco de plasma, exponga cada diente de 3 a 5 segundos.
 12. Puede ser necesaria una tercera aplicación en un período de 15 minutos cuando no se utiliza fuente de calor con el gel Niveous.
 13. Retire inicialmente el blanqueador con rollos de algodón y alta succión después de cada aplicación seguido por enjuague con agua, teniendo cuidado de no retirar la resina dique.
 14. Utilice un nuevo Pincel Acelerador para cada aplicación; un pincel debe ser suficiente para la aplicación de gel en 6 dientes.
 15. Después de completar el procedimiento retire el gel blanqueador con rollos de algodón y alta succión seguido por enjuague con agua para evitar el dispersamiento del gel.
 16. Después de remover el gel blanqueador Niveous, retire el material de resina dique utilizando un instrumento de mano. Se puede utilizar seda dental para retirar el dique interproximalmente.
-