



- συμβουλή.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, στυπώστε αμέσως με μπάλια βαμβάκιου υγραμένη με αλκοόλη και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τον στοματικό μαλακό ιστό, ο ιστός μπορεί να γίνει υπέρλευκος, ωστόσο θα αποκατασταθεί σε 2 με 3 ημέρες. Αποφύγετε να αγγίξετε ή να βουρτσώσετε την περιοχή.
- Χρησιμοποιείτε ιατρικά (οδοντιατρικά) γάντια και προστατευτικά γυαλιά για να αποφύγετε την ευαισθητοποίηση σε αυτό το προϊόν. Τα ιατρικά (οδοντιατρικά) γάντια παρέχουν κάποια προστασία ενάντια στην απειθείας επαφή με αυτό το υλικό, εντούτοις μερικά μονομερή μπορούν να διεισδύσουν μέσω των γαντιών και πολύ γρήγορα να φθάσουν στο δέρμα. Επομένως, εάν αυτό το υλικό έρθει σε επαφή ακόμη και με τα γάντια, πρέπει να τα αφαιρέσετε αμέσως και να πλύνετε τα χέρια σας με άφθονο νερό.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το άκρο εφαρμογέα και το βουρτσάκι για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Η μοναδιαία δόση προορίζεται για μία χρήση.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες της οδοντιατρικής μόνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες των δοντιών Καθαρίστε την επιφάνεια των δοντιών ακολουθώντας τυπικές μεθόδους
- Προετοιμασία κοιλότητων Προετοιμάστε την κοιλότητα ακολουθώντας, τυπικές μεθόδους
- Απομόνωση Απομονώστε με ελαστικό απομονωτήρα κ.λπ. ακολουθώντας τυπικές μεθόδους
- Προστασία του πολφού Προστατέψτε τον πολφό με υδροξείδιο του σεβεστίου σε περιοχές όπου η υπολειπόμενη οδοντίνη είναι λεπτή.
 - Μη χρησιμοποιείτε υλικό ουδέτερο στρώματος με ευγενή.
- Εφαρμογή Αφήστε το υλικό να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση όταν αποθηκεύετε το προϊόν στο ψυγείο. Φιάλη: Προετοιμάστε το βουρτσάκι προσαρτώντας το αναλύσιμο άκρο εφαρμογέα στη λαβή. Διανέμετε επαρκή ποσότητα BeautiBond σε ένα διακάριο (SHOFU V-DISH). Εφαρμόστε σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της κοιλότητας με το βουρτσάκι. Κλείστε ερμητικά το πώμα της φιάλης αμέσως μετά τη διαμόρφη και χρησιμοποιήστε γρήγορα όλο το διανεμημένο υλικό.

Μοναδιαία δόση: Στάστε το πώμα και εφαρμόστε το υλικό επάνω σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της κοιλότητας με ένα αναλύσιμο βουρτσάκι.

- Σε περιπτώσεις όπου η περιοχή του δοντιού που υποβάλλεται σε συγκόλληση αποτελείται κυρίως ή εξ ολοκλήρου από άκληη οδοντίνη, εφαρμόστε ένα αδοντιατρικό στρώμα αδανμνίνη πριν από την εφαρμογή του συγκολλητικού.
- Χρησιμοποιήστε όλο το διανεμημένο υλικό σε έναν ασθενή για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Στέγνωμα με αέρα Μετά την εφαρμογή, αφήστε σε ηρέμια για 10 sec. Στεγνώστε με απαλό ρεύμα αέρα για περίπου 3 sec και στη συνέχεια στεγνώστε με ισχυρότερο ρεύμα αέρα μέχρι να επιτύχετε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα συγκόλλησης.
- Φωτοπολυμερισμός Φωτοπολυμερίστε με οδοντιατρική συσκευή φωτοπολυμερισμού.

Συσκευή φωτοπολυμερισμού	Χρόνος φωτοπολυμερισμού
Αλογόνου LED	10 sec. 5 sec.

- Συσκευή φωτοπολυμερισμού αλογόνου Μήκος κύματος: 400-500 nm, ένταση φωτός: ≥ 500 mW/cm²
- Συσκευή φωτοπολυμερισμού LED Μήκος κύματος: 440-490 nm, ένταση φωτός: ≥ 1200 mW/cm²
- Χρησιμοποιήστε μια οδοντιατρική συσκευή φωτοπολυμερισμού η οποία έχει προδιαγραφές αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφονται παραπάνω. Εάν χρησιμοποιείτε κάποια που έχει απόδοση άλλη από αυτές τις συστάσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε οδοντιατρικής συσκευής φωτοπολυμερισμού για τον σωστό φωτοπολυμερισμό του BeautiBond.
- Οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικά γυαλιά ή πλακέτα προστασίας από το φως για να αποφεύγουν να κοίτσουν. Οι χειριστές πρέπει να προστατεύσουν επίσης τα μάτια του ασθενή από την απειθείας έκθεση στο φως του λαμπτήρα.
- Απολυμάνετε την οδοντιατρική συσκευή φωτοπολυμερισμού με αλκοόλη μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Η εμφρόση, ο φωτοπολυμερισμός, η δημιουργία περιγράμματος και η στήλωση του φωτοπολυμεριζόμενου οδοντιατρικού εμφρακτικού υλικού πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο, για να αποφύγετε την εισπνοή αετώνης (συμβαίνουν αρκετά κατ'άλληλοι αερισμοί ανά ώρα).
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το υλικό σε συνδυασμό με άλλο υλικό συγκόλλησης.
- Χρησιμοποιείτε σιελαντλία κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για την απομάκρυνση του νερού ή του σιέλου από το στόμα του ασθενή.
- Αποφεύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης διότι αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιοδήποτε άλλοις σκοπούς από εκείνους που περιγράφονται συγκεκριμένα στις ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εντός της ημερομηνίας λήξης που υποδεικνύεται στη συσκευασία και στον περιέκτη. (Παράδειγμα ☐ ΕΕΕΕ-MM-HH → Έτος-Μήνας-Ημέρα της ημερομηνίας λήξης)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάσσετε σε ψυγείο (1-10 °C) Φυλάσσετε μακριά από οποιοδήποτε πηγή φωτός.
- Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μεγάλες ποσότητες.

ZH

请在使用前仔细阅读

自酸蚀一步粘结剂

BeautiBond是用于粘结复合填充和其他修复的光固化单步粘结剂。BeautiBond为单瓶装或子瓶装。

产品成分

丙酮、蒸馏水、Bis-GMA（基质树脂）、羧酸单体、TEGDMA（活性稀释剂）、磷酸单体和其它

适应症

牙齿洞型缺损和树脂修复的粘结（包括牙本质）

注意事项

- 不要将该产品用于已知对这种材料和/或异丁烯酸盐单体过敏的患者。
- 已知对这种材料和/或异丁烯酸盐单体过敏的操作者不要使用该产品。
- 如果患者或操作者使用该产品后出现炎症或过敏反应，请立即停止使用并就医。
- 避免接触到皮肤或衣物。如果不小心接触，请立即用酒精棉花球擦干，并用大量清水冲洗。如果不小心接触到眼睛，立即用大量清水冲洗眼睛并就医。
- 如果该产品接触到口腔软组织，组织可能会发白，但是2到3天就会消失。不要触摸或刷拭区域。
- 使用医用（口腔）手套和防护眼镜，以避免对该产品的敏感。医用（口腔）手套可直接接触该材料；但是一些产品可通过手套很快渗透到皮肤。因此，即使该材料接触到手套，也需要立即脱下并用大量清水冲洗。
- 请勿重复使用小毛刷头和毛刷以避免交叉感染。
- 子瓶装请一次性使用。
- 该产品仅供口腔专业医生使用。

使用说明

- 牙齿表面清洁按照标准方法进行牙齿表面清洁
- 牙体预备按照标准方法进行牙体预备
- 隔离按照标准方法用橡皮障隔离
- 牙髓保护如果近髓用氢氧化钙盖髓。
 - 请不要使用氧化锌丁香油垫底。
- 用途将本产品储存在冰箱时，在使用前要使材料达到室温。
单瓶装：
 - 通过将一次性小毛刷头安装至手柄将毛刷准备好。取适量BeautiBond粘结剂至调和盘中（SHOFU V-DISH），用毛刷均匀涂在整个窝洞表面。使用后请立即盖紧瓶盖，并及时将产品所取出的材料。
子瓶装：
 - 去盖并用一次性毛刷均匀涂在整个窝洞表面。
 - 如果窝洞洞壁大部分是牙釉质或者全部是牙釉质，在使用处理剂前使用酸蚀剂。
 - 请为一病人使用取出的所有材料，以避免交叉感染。
- 空气吹干涂抹后静置10秒钟，用柔和的空气吹约3秒吹干。之后用较强的空气吹干直至形成薄且均匀的粘结层。
- 光固化用光固化灯进行光照。

光固化机	光固化时间
卤素灯LED灯	10 秒5 秒

- 卤素灯光固化机
波长：400-500纳米，
光照强度：≥ 500mW/cm²
- LED灯光固化机
波长：440-490纳米，
光照强度：≥ 1,200mW/cm²
- 使用具有相当于上述规格的光固化机。当使用建议以外的其他性能时，请遵循各台光固化机的使用说明，以便正确对 BeautiBond进行光固化。
- 操作者必须佩戴防护眼镜或使用遮光板，以避免光固化灯直接照射。操作者同时还必须保护患者的眼睛，避免其暴露于光固化灯的直射下。
- 每次使用后，请用酒精对光固化机进行消毒，以避免交叉污染。

8. 光固化材料的充填、光照、打磨和抛光请遵循厂家使用说明。

使用注意事项

- 请在通风良好的地方使用，以避免吸入丙酮（建议每小时进行几次适当的良好的）。
- 不要与其它粘结材料一起使用该材料。
- 充填时请使用吸唾器，以去除患者口腔中的水或唾液。
- 属于易燃产品，需要远离火源。
- 不要将该产品用于使用酒精对中适应症明确列出以外的任何其他方面。
- 在包装及容器所示的有效期限内使用该产品。
（例 ☐ YYYY-MM-DD → 表示使用期限至YYYY 年MM 月DD 日）

儲存

- 保存在冰箱中（1-10 °C ），远离火源。
- 不要大量储存该产品。