



# ROBOT POINTS PRO-CUT

**es** Instrucciones de uso

IFU-000376  
01.0:2025-01

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO

## Fresa dental de diamante FG

### FINALIDAD PREVISTA

**Indicaciones de uso y ventaja clínica:** contorneado y acabado de dientes naturales, hueso y prótesis dentales **Grupo de pacientes previsto:** desde niños hasta adultos

● Utilizar un aspirador de polvo local, mascarilla antipolvo, etc. durante el uso de este producto para evitar los efectos nocivos del polvo en el organismo de las personas. ● Utilizar un equipo de protección durante el uso, como gafas, para evitar daños en los ojos. ● Si se produce un peligro importante para la salud del paciente o del dentista por el uso de este producto, notificar a la autoridad local competente, a nuestro distribuidor local y a la empresa de ventas. La información de contacto de nuestras empresas de ventas está disponible en [www.shofu.com](http://www.shofu.com).

### INSTRUCCIONES DE USO

● Introducir por completo el mandril en el portabrocas de la pieza de mano siguiendo las instrucciones del fabricante. ● Hacer una marcha de prueba antes de usar los instrumentos para comprobar que su funcionamiento es seguro y correcto y sin excentricidad. ● No utilizar los instrumentos que estén dañados o defectuosos, es decir, que tengan corrosión, daños en su superficie, estén deformados o estén sucios. ● No superar nunca las velocidades de rotación máximas permitidas. ● Evitar usar en ángulos agudos o con una presión excesiva. ● Utilizar de manera intermitente con toques ligeros y aerosol de agua. ● El producto se puede reutilizar un máximo de 20 veces. ● No usar este producto para propósitos que no estén especificados en estas instrucciones de uso. ● Este producto está previsto para ser utilizado exclusivamente por profesionales dentales.

### REPROCESADO

**<Notas>** ● Reprocesar los instrumentos antes de cada uso. ● No usar desinfectantes a base de cloro ni ácido peracético para evitar la corrosión del mandril. ● Seguir las instrucciones de uso del fabricante de CIDEZYME/CIDEX OPA, la lavadora desinfectadora o el autoclave. **<Tratamiento inicial después del uso>** ● Después del uso intraoral, la limpieza debe empezar en la primera hora. **<Limpieza manual y desinfección>** ● Usar CIDEZYME/CIDEX OPA para la limpieza/desinfección manual respectivamente. ● Después de limpiar y desinfectar, eliminar a fondo el limpiador y el desinfectante con agua. ● Eliminar bien la humedad con un paño y dejar secar por completo. **<Limpieza y desinfección mecánicas>** ● Usar CIDEZYME/CIDEX OPA para el prelavado manual. ● Limpiar y desinfectar con una lavadora desinfectadora que cumpla con ISO 15883. **<Esterilización>** ● Introducir en una bolsa de esterilización y sellar de forma segura. ● A continuación, esterilizar en autoclave a 134 °C durante 3 min. ● Usar un autoclave de clase B. **<Almacenamiento>** ● Tras la esterilización, no abrir la bolsa hasta el siguiente uso para mantener su esterilidad. ● Almacenar en un lugar limpio y seco.

**Para más información sobre la limpieza, esterilización y desinfección, visite nuestra página web [www.shofu.com](http://www.shofu.com).**

---

### **ALMACENAMIENTO**

●Almacenar a temperatura ambiente (1-30 °C). ●Evitar la exposición a la humedad, a las sustancias químicas corrosivas y a sus vapores. ●Evitar la luz solar directa, la presión externa (carga física) y el riesgo de contaminación.

### **ELIMINACIÓN**

Eliminar el contenido y los contenedores de acuerdo con las normas locales y nacionales pertinentes.

### **POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS/RIESGOS RESIDUALES**

Si las ROBOT POINTS PRO-CUT no se limpian y esterilizan siguiendo las instrucciones, existe riesgo de infección cruzada.



SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

[www.shofu.com](http://www.shofu.com)

SHOFU DENTAL CORPORATION

1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.

1 Science Park Road, #01-01/02 The Capricorn, Singapore Science Park II, Singapore 117528