



ROBOT POINTS PRO-CUT

Mode d'emploi

IFU-000376
01.0:2025-01

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Fraise dentaire diamantée FG

UTILISATION PRÉVUE

Indications d'emploi et bénéfice clinique : modelage et finition de dents naturels, de tissus osseux et de prothèses dentaires **Population de patients cibles** : pour l'enfant et l'adulte

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE

● Utiliser un aspirateur de poussières local, un masque contre les poussières, etc., pendant l'utilisation de ce produit pour éviter tout effet nocif des poussières sur le corps humain. ● Porter un équipement de protection (p. ex. des lunettes) pendant l'utilisation pour éviter tout risque de lésion oculaire. ● En cas de problème de santé grave touchant un patient ou un opérateur en lien avec l'utilisation de ce produit, il convient de le signaler aux autorités compétentes locales, à notre revendeur local ainsi qu'à la société de distribution. Les coordonnées de nos sociétés de distribution sont disponibles sur notre site www.shofu.com.

MODE D'EMPLOI

● Insérer l'intégralité de la tige dans le mandrin de la pièce à main en suivant les instructions du fabricant. ● Faire un essai de fonctionnement avant toute utilisation pour vérifier l'absence de danger et de faux-rond. ● Ne pas utiliser les instruments endommagés ou présentant un défaut, à savoir présence de traces de corrosion, d'un défaut de surface, d'une déformation et de saletés. ● Ne jamais aller au-delà des vitesses de rotation maximales permises. ● Éviter toute application sur les angles aigus ou avec une pression excessive. ● Utiliser par intermittence en appliquant une pression très légère et un jet d'eau. ● Nombre maximal de réutilisations : 20. ● Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles spécifiquement mentionnées dans ce mode d'emploi. ● Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation par des professionnels dentaires.

RETRAITEMENT

<Remarques> ● Retraiter les instruments avant chaque utilisation. ● Ne pas utiliser de désinfectant à base de chlorure ni d'acide peracétique pour éviter la corrosion de la tige. ● Suivre le mode d'emploi du fabricant de CIDEZYME/CIDEX OPA, du laveur-désinfecteur ou du stérilisateur autoclave. **<Premier traitement après utilisation>** ● Après une utilisation intraorale, le nettoyage doit être débuté dans un délai d'une heure. **<Nettoyage et désinfection manuels>** ● Utiliser CIDEZYME/CIDEX OPA, respectivement, pour le nettoyage/la désinfection manuels. ● Après le nettoyage et la désinfection, retirer soigneusement le détergent et le désinfectant avec de l'eau. ● Éliminer soigneusement l'humidité avec un chiffon, puis laisser sécher entièrement. **<Nettoyage et désinfection mécaniques>** ● Utiliser CIDEZYME/CIDEX OPA pour le pré-lavage manuel. ● Nettoyer et désinfecter dans un laveur-désinfecteur conforme à la norme ISO 15883. **<Stérilisation>** ● Placer dans une poche de stérilisation et fermer hermétiquement. ● Passer ensuite à l'autoclave à 134 °C pendant 3 min. ● Utiliser un stérilisateur autoclave de classe B. **<Stockage>** ● Après la stérilisation, la poche ne doit en aucun cas être ouverte avant utilisation pour maintenir sa stérilité. ● Stocker dans un lieu propre et sec.

Pour plus d'informations sur le nettoyage, la stérilisation et la désinfection, consulter notre site www.shofu.com.

STOCKAGE

● Stocker à température ambiante (1 à 30 °C). ● Éviter toute exposition à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques corrosifs et à leurs vapeurs. ● Protéger de la lumière directe du soleil, de la pression externe (charge physique) et de toute contamination.

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu et les contenants conformément aux réglementations locales et nationales applicables.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES/RISQUES RÉSIDUELS

Si les ROBOT POINTS PRO-CUT ne sont pas nettoyés et stérilisés selon les instructions, il existe un risque de contamination croisée.



SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

SHOFU DENTAL CORPORATION

1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.

1 Science Park Road, #01-01/02 The Capricorn, Singapore Science Park II, Singapore 117528