MonoCem®

CEMENTO DE RESINA AUTO ADHESIVA



Presionar aquí para mezclar¹ antes de colocar la punta de mezcla. Exprimir 1-2mm en el papel de mezclar. 15ölo al principio de jeringas nuevas.



1. Preparar Diente enjuagar y dejar húmedo



2. Preparacion de Restauración colocar MonoCem directamente en la corona y cubrir la jeringa despues



3. Posicion de Restauración colocar la corona en la preparación, curar el exceso de cemento por 1-2 segundos



4. Retire el Exceso de Cemento utilizar un instrumento adecuado y retire



5. PFM Fase de no Perturbe mantener la presión positiva por 2-1/2 minutos, despues fotopolimerizar los márgenes durante 20-40* segundos con un curado auto completo en 3 minutos y medio, Retirar cualquier cemento adicional



con un hilo dental limpiar de arriba a abajo para la limpieza de los márgenes





Tiempos de curado varian. Todas las coronas de cerámica, de inlay / onlay, tienen un fotocurado de 20-30 segundos. Postes y cementación de núcleo fotopolimerizar durante 40 segundos. Consulte las instrucciones de uso Monocem para obtener instrucciones más detalladas

Productos Complementarios



OneGloss®



OneGloss es el paso final de acabado y pulido que proporciona el acabado ideal para todos los tipos de restauraciones de resina. Simplemente alternando la presión de contacto sobre el proceso de acabado y pulido.



- Pulidores de óxido de aluminio son desechables
- Disponibles en tres formas diferentes
- Suficientemente resistente para soportar el pulido de un arco completo
- Ideal para la eliminación del cemento

Super-Snap®



Super-Snap está diseñado para una fácil, rápida, y una terminacion segura, disenado para el acabado y pulido de todas las resinas hibridas y de microrrelleno.

- terminacion elastica para facilitar la colocación del disco sobre el mandril
- Fabricado sin un centro metalico
- Muy flexibles, discos ultra-finos permiten un acceso fácil en las áreas interproximales
- Dos tamaños cuatro granos (carburo de silicona y óxido de aluminio)







